

TUOTETIEDOT SINGLE LAYER -SUOJUS

- Materiaali: 100% polyesteriä

Anatominen muotoilu. Suojus peittää täysin käyttäjän nenän ja suun alueen.

Kasvosuojus vähentää ulos hengitettävän ilman mukana kulkeutuvia pisaroita ja taudinaiheuttajia. Suojus pienentää lähellä olevien ihmisten ja esineiden altistumista.

Huomioitavaa on, että kyseinen kasvosuojus ei ole henkilöön- tai hengityssuojain. Kasvosuojuksen käyttö on ei-lääkinnällinen tapa, jolla jokainen voi osallistua epidemian lieventämiseen.

Voidaan pestä 60°-90°:ssa. Usein toistuva pesu 90° saattaa haalistaa värejä.

KÄYTTÖOHJE

Pese suojus ennen ensimmäistä käyttökertaa!

1. Varmista, että suojus on oikeinpäin. Aseta suojus varovasti naamallesi, niin että se peittää nenäsi.
2. Vedä toisella kädellä suojuksen alareuna alas peittääksesi suusi ja leukasi kokonaan. Suojuksen tulee olla mahdollisimman ilmatiivis.
3. Tämän jälkeen liu'uta suojuksen sivukannat korvan taakse.
4. Kun poistat suojuksen, aseta peukalo korvan takana olevan kahvan alle ja nosta suojus pois.

TAI

1. Varmista, että suojus on oikeinpäin. Ota molemmista sivukannoista kiinni ja vie ne korvien taakse.
2. Tämän jälkeen aseta suojus nenän, suun ja leuan päälle mahdollisimman ilmatiiviisti.
3. Kun poistat suojuksen, aseta peukalo korvan takana olevan kahvan alle ja nosta suojus pois.

Älä kosketa suojusta kasvojen puolelle tulevasta osasta missään vaiheessa.

Jos suojus kastuu käytön aikana, on kastunut suojus korvattava toisella suojuksella. Älä purista, rypistä tai taita suojusta. Käsittelethän suojusta puhtain käsin tai hanskein.

